

この度は、弊社の「4Dハートフルクッション」をご購入いただきまして、誠にありがとうございます。正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みください。また、この取扱説明書は、いつでも見ることができる場所に、大切に保管してください。

警告



- 燃やしたり、異常に高温になる場所に近づけないでください。
- 本品は、介護環境やご使用者様の身体条件など、すべてのケースで床ずれ防止を保証するものではありません。万が一、本品ご使用中に床ずれが発生、進行した時は、すぐに専門家にご相談ください。


注意




- ご使用には、必ず付属のクッションカバーをお付けください。
- 中の本体保護カバー(白色)を取り外したり、洗ったりしないでください。
- 破損の原因となりますので、鋭利なものを近づけないでください。
- 紫外線は、変質の原因となりますので、天日干しをしないでください。
- 保管時などに、硬く重いものを載せたりしないでください。
- 破損の原因となりますので、折り曲げてご使用しないでください。
- その他、ご使用上で分からないことがあれば、必ず弊社までお問い合わせください。

◆ 設置方法について

本品には、表裏と前後があります。(図1~3ご参照)
表裏と前後を間違えてご使用されますと、製品本来の性能が発揮されませんのでご注意ください。

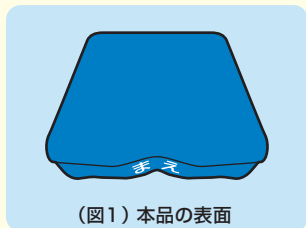

(図1) 本品の表面

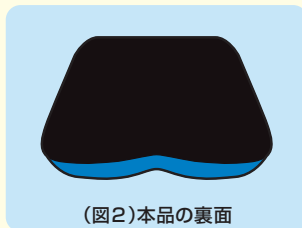


(図2) 本品の裏面




(図3) 設置例

◆ クッションカバーの取り外し方と入れ方について

クッションカバーを取り外す時は、後側のチャックを開けてください。**中の本体保護カバー(白色)**は、絶対に外さないでください。
カバーに入れる時は、表裏と前後を間違わないようにしてください。カバーに入れたら、チャックをしっかりと閉めてください。

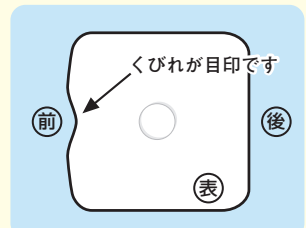

中央に凸のある方が表です。

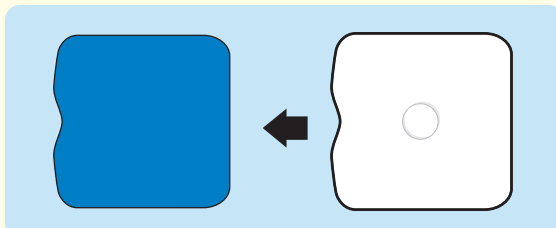

クッションカバーも本体も、同じ向きに揃えてください。





カバーの挿入口から、本体を少し曲げて入れてください。

◆ 本品の斬新なデザインについて

本品は、お尻の部分が盛り上がるという、これまでになかった斬新な形状をしています。これは、

- ① お尻の両側で飛び出している坐骨を支えることで姿勢を安定させる。
 - ② 脂肪の少ないお尻の真ん中でも体重を効率よく分散させるためです。
- それらは、正しい座り方をさせていただくことで最大限の機能を発揮します。

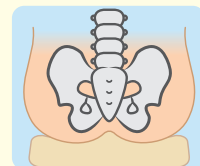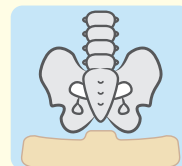

◆ 座り方について

- ① 本取扱説明書表面「設置方法」でご説明させていただいた通り、車いすや椅子の上に本品を置いてください。
- ② お座りになる位置は、お尻の真ん中が盛り上がった部分に当たったり(図2ご参照)、クッションからはみ出たり(図3ご参照)しないようにお座りください。(図1ご参照)

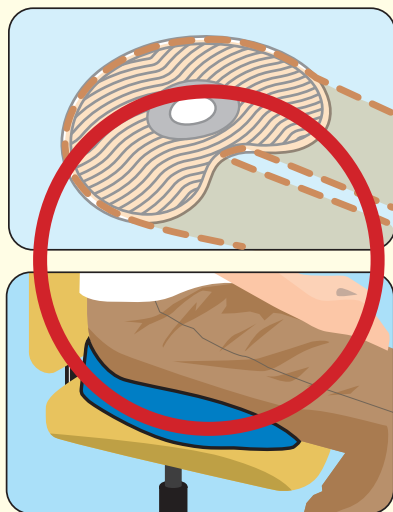


図1 正しい座り方

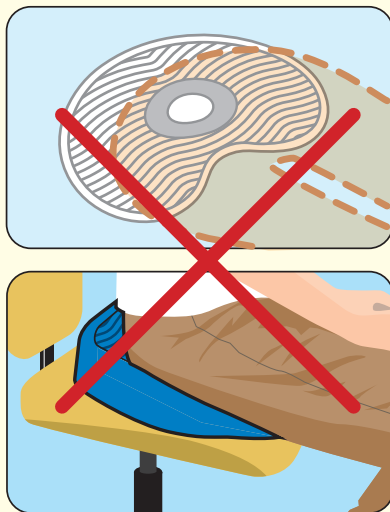


図2 悪い座り方

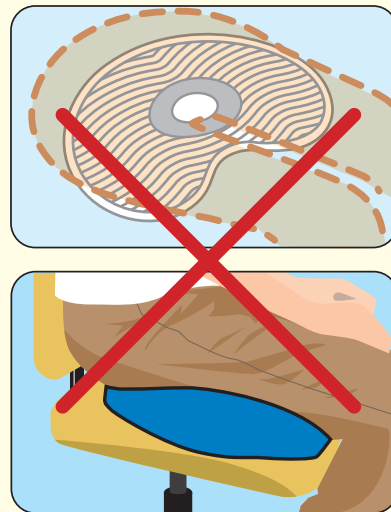


図3 悪い座り方

◆ お座りになってからのご注意

- ① お使い始めに、多少の違和感があっても、数分で体に馴染みますので、そのままお座りください。
- ② わずかですが、着座位置が高くなります。フットレストやアームレストの高さ調整ができる車いすをご使用の場合は、それらの高さを再調整してください。

◆ お手入れの仕方について

<クッションカバー>

- ・家庭用中性洗剤で常温(30℃以下)にて洗濯をしてください。
 - ・ドライクリーニングや、漂白剤、柔軟剤のご使用はできません。
 - ・洗濯後は乾燥機はご使用せず、自然乾燥させてください。
- ※カバーの座面部裏側には、防水フィルムを使用しています。

<本体>

- ・水洗いできません。洗濯機・乾燥機の使用はおやめください。
- ※本体保護カバー(白色)は、取り外したり、洗ったりしないでください。
- ・ご使用前に、必ずクッションカバーをお付けください。



外観

形状(保護カバー無し)

4Dハートフルクッション

品番 **FD40406**

[サイズ] 40×40×6cm(厚) [重量] 1.5kg

[材質] ポリウレタン

クッションカバー: ポリエステル91%、スパンデックス9%

TPU防水フィルム付(座面内側)、PVC(底部滑り止め)

本体保護カバー: コットン100%

MADE IN TAIWAN

※クッションカバーの別売りもございます。

輸入総代理店

アクションジャパン株式会社

〒658-0046 神戸市東灘区御影本町2丁目9-16

アクションジャパンビル

TEL.078-843-5417 FAX.078-843-6817

<http://www.actionjapan.co.jp>