

ポリエアー

ACTION
JAPAN

取扱説明書



この度は、アクションジャパン株式会社のポリエアーをご購入いただきまして、誠にありがとうございました。
正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みください。
また、この「取扱説明書」はいつでも見ることができる場所に大切に保管してください。

安全上の警告

- ⚠️ ポリエアーの使用に際しては、必ず専門家(医師や看護師など)にご相談の上 ご使用ください。
また、使用中に身体に異常を感じたり、不安を感じた場合は、直ちに使用を止め専門家に相談してください。
症状悪化や事故の恐れがあります。
- ⚠️ 燃やしたり、火を近づけたりしないでください。
- ⚠️ ポリエアーは介護環境やご使用者の身体状態など、すべてのケースで床ずれ防止を保証するものではありません。万一、ポリエアーをご使用中に床ずれが発生・進行したときは、すぐに専門家にご相談ください。

梱包内容

- ◆ ポリエアー(専用カバー付属)
- ◆ ポリエアー専用ポンプ
- ◆ ポリエアー専用ゲージ
- ◆ 修理キット
- ◆ 取扱説明書

空気調整方法


ポリエアーには2ヶ所に空気を入れる弁(以下、空気弁)がついています。
空気調整の基になる指数は、ご使用者の ①体重 ②ヒップサイズ により専用ゲージで割り出します。

1. 指数を割り出してみましょう

(1) 車椅子にしっかりとバランスよく座り、ヒップサイズを図1のように測ります。

- ⚠️ 正確な数値を出すために、背もたれにほぼ垂直にきっちり座って測ってください。
- ⚠️ 正確な数値を出すために、クッションなどをお尻の下においていない状態で測ってください。

図1

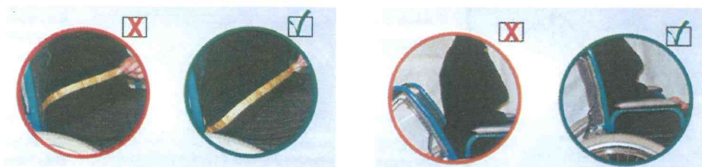

(2) 体重がわからない場合は測ってください。


(3) 専用ゲージの『kg』『cm』の単位の方で割り出します。

外円の体重目盛り『kg』のご使用者体重の数値箇所、内円のヒップサイズ目盛り『cm』のご使用者ヒップサイズの数値を合わせるように回します。

(4) ゲージの小窓部分に黄色い矢印で表示された数字が、ご使用者に合った空気量の指数です。

例) 体重50kgでヒップサイズ90cmであれば、指数は6です。

! 専用ゲージをなくさないようにご注意ください。

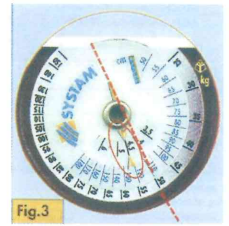

2. 最適な空気量に調整します。


(1) ポリエアー(カバーをつけた状態)を2ヶ所の空気弁が前方にくるように、車椅子上に置きます。

(2) ポリエアーに人が座っていない状態で、2ヶ所の空気を入れる弁から黄色い目盛りあたりまで空気を入れます。専用ポンプのホースの先端のつまみをつまんで、空気弁に差し込みます。専用ポンプのポンプ部分を押して空気を入れます。

(3) 専用ポンプを片方の空気弁に差し込んだまま、ご使用者がポリエアーに座ります。この際、手は膝の上のせて、足はフットレストに膝が垂直になるように座ってください。また、背中を背もたれにぴったりつけるイメージでしっかりバランスよく座ってください。

(4) 専用ポンプの針が大きくふれますので、針の動きが落ち着いたら、圧力計の下部分にある銀色のバルブ(②部分)を緩めて空気を抜いて調整します。

(5) 調整が終わったらバルブをしっかり締めて、空気弁から専用ポンプを外し、空気弁のキャップを閉めて、もう片方の空気調整を行います。

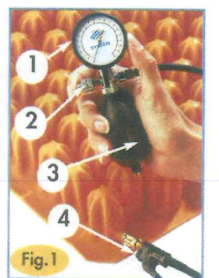

! ポリエアーに人が座っている状態で、空気を入れしないでください！

専用ポンプが故障する大きな原因になります。

もしも、空気調整の際に空気を足さなければならない状況の場合には、必ず人が座っていない状態で空気を入れるようにしてください。

! 万が一 ポリエアーに穴があいていると空気が抜けて底つきし、床ずれの危険性が高まります。ご使用前には必ず空気調整をおこなってください。

! 適正な指数はご使用者によって異なります。また、体重の増減やヒップサイズの増減で指数は変わりますので、定期的にサイズの測定をおこなってください。

! 指数は空気調整の目安です。ご使用者の座り方によっては、指数どおりの調整では不十分な場合がございますので、その時は専門家のアドバイスに従ってください。

お手入れ方法

◆ カバー


本体からカバーを取り外し、中性洗剤で洗い、陰干してください。



◆ 本体

水温は40℃以下で、中性洗剤を薄めたもので洗ってください。

直射日光に長時間あてないでください。強い水圧にご注意ください。

 洗淨時にキズをつけないようにご注意ください。

◆ 修理

修理キットが標準装備されておりますので、小さな穴程度であれば修理キットで修理も可能です。

(自転車のタイヤチューブのパンク修理と同じような方法です。)

仕様

品番	4010	4006	3606
サイズ	幅40×奥40×厚10cm	幅40×40×厚6cm	幅36×奥36×厚6cm
重量	1.3kg	850g	700g
耐荷重	100kg	80kg	80kg
素材	〈本体〉ラックスプレン素材 〈カバー〉ポリエステルジャージ素材、ポーラ生地		

アクションジャパン株式会社

〒658-0046

兵庫県神戸市東灘区御影本町2-9-16

TEL. 078-843-5417 FAX. 078-843-6817

<http://www.actionjapan.co.jp>

