


# マトリックスクッション取扱説明書

マトリックスクッションは、圧力を最大限まで分散し、滑り落ち(前ずれ)を防ぎ、安定した座位をご提供致します。

## 使い方

1. 右図の通り、クッションの前と後を確認し、車椅子に置いて下さい。
2. 臀部中央がクッションのくぼみ部分に入るようにお座り下さい。
3. クッション裏面には、滑り止め加工が施されていますが、不安定な場合は、付属のマジックテープをご使用下さい。

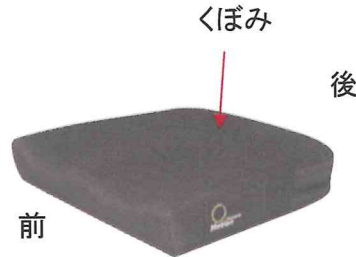

注意: マトリックスクッションは、カバー無しでは絶対にご使用しないで下さい。  
クッションの破損原因となります。

## ポイント1

除圧効果を最大限に得るためには、膝の高さをクッション表面と水平になるようにフットサポートを調節し、太ももの重さがクッションにかかる(太ももとクッションの間に隙間がない)状態にします。フットサポートの高さを正しく調節することにより、さらに効果的に床ずれにかかる圧力が軽減できます。

## ポイント2

車椅子の座布がたわんだ状態でクッションを使用することはお避け下さい。  
また、たわんだ背布のまま、車いすをご使用することもお避け下さい。

## カバーの洗濯(外側カバー)

クッションからカバーを外します。  
洗濯機を使用する場合は、洗濯ネットに入れ、手洗い設定で洗濯し、陰干して下さい。  
わずかな汚れであれば、濡れタオルなどで簡単にふき取ることができます。  
注意: 乾燥機は使用できません。



防水加工の内側カバーは、スポンジを保護するために常に装着したまま、ご使用下さい。  
もし、内側カバーが汚れた場合は、タオルなどで汚れを拭き取って下さい。  
洗濯後の外側カバーに、内側カバーに入った状態でクッションを入れて下さい。  
(外側カバーも内側カバーも、チャックの付いている方が後になります)

## 注意:

ウレタンフォームは、水分を吸収すると、クッション本来の効果を十分に発揮できなくなりますので、くれぐれも濡らさないように注意して下さい。

輸入発売元  
アクションジャパン株式会社  
〒658-0046  
神戸市東灘区御影本町2-9-16  
TEL: 078-843-5417  
FAX: 078-843-6817  
<http://www.actionjapan.co.jp>