

マトリックス Viクッション



ACTION
JAPAN

取扱説明書

この度は、アクションジャパン株式会社のマトリックスViクッションをご購入いただきまして、誠にありがとうございました。正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みください。また、この「取扱説明書」はいつでも見ることができる場所に大切に保管してください。

安全上の警告

- ⚠ 車椅子用クッションのご使用に際しては、必ず専門家（医師や看護師など）と相談の上、ご使用ください。また、使用中に身体に異常を感じたり、不安を感じた場合は、直ちに使用を止め専門家に相談してください。症状悪化や事故の恐れがあります。
- ⚠ 燃やしたり、火を近づけたりしないでください。
- ⚠ マトリックスViクッションは介護環境やご使用者の身体状態など、すべてのケースで床ずれ防止を保証するものではありません。万一、マトリックスViクッションをご使用中に床ずれが発生・進行したときは、すぐに医師にご相談ください。

梱包内容


- ◆ マトリックスViクッション（専用カバー付き）
- ◆ クッション固定用面ファスナー（マジックテープ）
- ◆ 取扱説明書

ご使用方法

マトリックスViクッションは、圧力を最大限まで分散し、前ずれ姿勢を防ぎ安定した座位をご提供します。

1. 図1のとおり、クッションの前側と後側を確認し、車椅子においてください。
2. 臀部中央がクッションのくぼみ部分に入るようにお座りください。
3. クッション裏面には、滑り止め加工が施されていますが、不安定に感じる場合は、付属しております面ファスナーを車椅子の座面と、クッションの裏側につけて固定してください。

- ⚠ **マトリックスViクッションは、必ずカバーを付けてご使用ください。**
カバーなしでのご使用は、クッション破損の大きな原因になります。

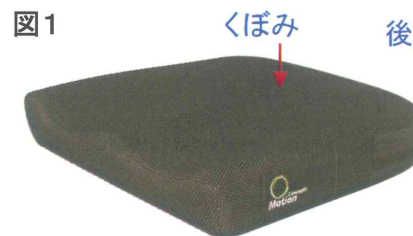

ご使用のポイント

除圧効果を最大限に得るためには、膝の高さをクッション表面と水平になるようにフットサポートを調節し、太ももの重さがクッションにかかる(太ももとクッションの間に隙間がない)状態にします。フットサポートの高さを正しく調節することにより、効果的に除圧ができます。

⚠ 車椅子の座布がたわんだ状態でのクッションのご使用は、クッションの効果が落ちる原因になります。また、座る姿勢が悪くなったり、体が傾いたままになってしまう危険もありますので、座布や背布がたわんだ状態の車椅子をご使用の際には、ソリッドシート等での対策をお勧めします。

お手入れ方法

◆ 外側カバー

本体からカバーを取り外し、手洗いのあと、陰干してください。



また、わずかな汚れであれば、濡れタオルなどで簡単に拭き取ることができます。

◆ 内側カバー

防水加工の内側カバーは、ウレタンフォームを保護するために、常に装着したままご使用ください。汚れた場合は、清拭してください。

⚠ 外側カバーも内側カバーもチャックのついている方が後側です。

⚠ ウレタンフォームは水分を吸収すると、本来の効果を十分に発揮できなくなりますので、くれぐれも濡らさないように注意してください。



仕様

品番	M1616VI	M1415VI
サイズ	幅40×奥40×厚8cm	幅35×奥38×厚8cm
重量	1.3kg	1.1kg
耐荷重	136kg	136kg
素材	〈カバー〉 ポリエステル 〈本体〉 ビスコエラストリックフォーム	