

Matrix Back サポート取り付け方法


1. 車椅子の標準でついている背布を外して下さい。
2. 車椅子の背パイプに、取付金具を下記の点にご注意の上、お取り付け下さい。

① 取り付け金具の向きにご注意下さい。(下図をご参照下さい。)

* 右図の左手前が車椅子の背面です。



- ② 左右の高さが均一になるようにお取り付け下さい。
- ③ 左右各3本、計6本の六角ネジで取り付けますが、位置決め確定までは仮締めとして下さい。
- ④ この状態で、バックサポート本体を取り付け金具に取りつけて下さい。

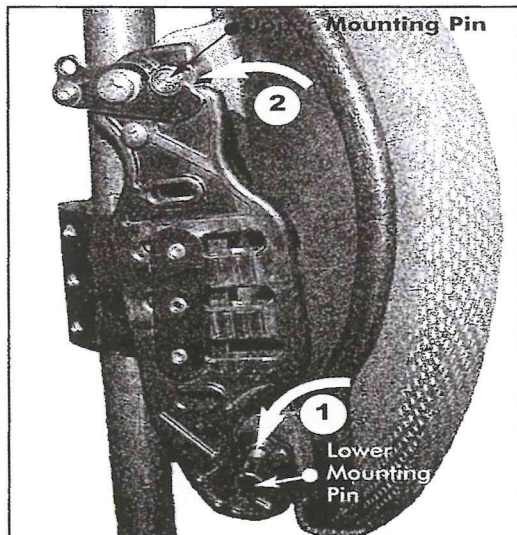

バックサポート本体の上下にある引っ掛け棒を取付金具の上下のフックにしっかりとはめ込んで下さい。

(左図は取付金具の向きが本説明書と異なる取り付け方法の図になっています)

車椅子の背パイプの幅が広い場合は、引っ掛け棒がネジ式になっていますので、回すと長さの調整ができます。

- ⑤ すべてのネジの仮締めが完了したら、ご使用者にお座り頂き、高さを調整して下さい。
 - ⑥ 次に、奥行とリクライニング角度の調整をして下さい。
奥行とリクライニング角度の調整は、3.5cmの横溝に付いていますネジ3本で調整できます。
 - ⑦ 高さとお行・リクライニング角度が決まれば、それぞれの六角ネジを本締めして下さい。
(あまり強く締め過ぎると、ネジが破損することがありますのでご注意下さい)
3. バックサポート本体を外す時は、後の紐を引きながら本体を持ち上げると簡単に外すことができます。
 4. バックサポート本体を取り外せば、取付金具はそのままで車椅子の折り畳みができます。

輸入・発売元 アクションジャパン株式会社

〒658-0046 兵庫県神戸市東灘区御影本町2-9-16

TEL:078-843-5417 FAX:078-843-6817