

HS2070/HS2110


この度は、弊社商品をご購入頂きまして、誠にありがとうございます。
下記の組み立て方法をよくお読みになり、ご活用下さい。

脚と座面の組み立て方法

※写真はHS2070を
使用しています。




①まず、箱から商品を取り出して下さい。

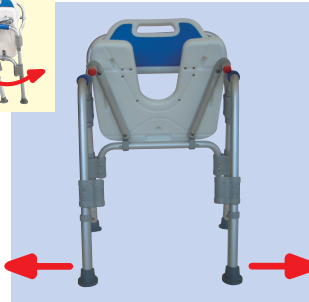

②脚を矢印の方向へ外側に開きます。



③両脚が開いたら、座面をゆっくりと下ろします。

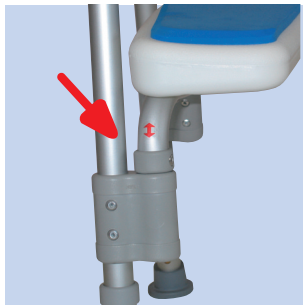


④下ろした座面のパイプ部分を、矢印で示された穴へしっかり差し込みます。



⑤パイプ脚と座面がしっかり固定されていることを確認し、完了です。

高さ調整方法

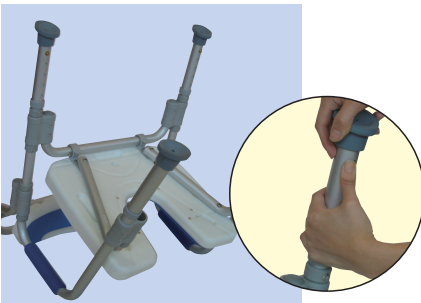

①パイプ脚についている金色のボタンを押しながら、お好みの高さの穴に合わせて下さい。



②金色のボタンがしっかりと固定穴から出ているのを確認して下さい。
(両脚、4箇所)



③脚を引っ張っても抜けなければ、完了です。
※安全性の関係で、4脚とも同じ高さに調整して下さい。

お買い求めの商品につきまして、ご質問・ご意見などがございましたら、何なりとお申し付け下さい。

生命を包む世界品質
ACTION
JAPAN

企画開発・輸入発売元

アクションジャパン株式会社

〒658-0046神戸市東灘区御影本町2丁目9-16

アクションジャパンビル

TEL:078-843-5417 FAX:078-843-6817