

# 取扱説明書 よくお読みになり、正しくお使いください

商品名：神戸すてっき（ワンタッチ無段階調整機能）

サイズ：全長67～103cm 重さ：430g

材質：本体-アルミニウム 脚ゴム-合成ゴム  
グリップ本体-ポリプロピレン

握り部-TPR樹脂

製造：MADE IN TAIWAN


## 神戸すてっき

この度は、弊社製品をご購入いただきまして、誠にありがとうございます。  
ございます。

正しく安全にご使用いただくため、本説明書をよくお読みになり、  
ご不明な点があれば、ご購入された販売店か、弊社までお問い合わせ  
ください。

### 高さ調整の仕方


高さを変えるときは、グリップ  
の下部にあるボタンを押しながら  
調整をしてください。  
終了後は、ボタンが上がり、  
しっかりと上下パイプが固定さ  
れていることをご確認ください。

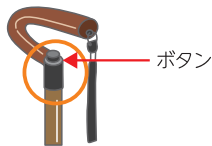

※ボタンを押さなくても、上下パイプ  
を引くとパイプは伸びますが、構造  
上に問題ございません。

### 高さ調整の目安

高さ調整の目安は、足先前方  
の外側20cmに杖の先端を置い  
た時、肘の角度が30～40度  
になるくらいです。

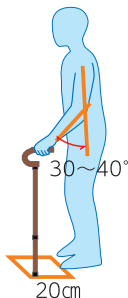

## ⚠️ 安全にご使用いただくためのご注意！

- ◆ この製品は、自立歩行のできる方が対象です。
- ◆ 凸凹のある地面や滑りやすい地面、柔らかい地面等では、転倒や破損の恐れがありますので、使用しないでください。
- ◆ グリップ以外を持ちたり、グリップの一部を持つと、破損や転倒の危険がありますので、グリップの中央を持ってください。
- ◆ 体から極端に離れた所に杖をついたりすると、破損や転倒の危険があります。
- ◆ ご使用前に、各部に亀裂や変形、ガタツキ等がないか点検をしてください。何か問題がある場合は、使用しないでください。
- ◆ 脚ゴムが摩耗したり破れたり、取れたりした場合は、使用中を中止し、新しいものに取り換えてください。
- ◆ ご使用後は、汚れや水分を拭き取り、乾燥した室内に保管してください。
- ◆ 高さ調整ボタン（グリップの付け根）に、体や物が当たらないようご注意ください。
- ◆ 製品の分解、改造等をしないでください。脚ゴムなど消耗品は、純正部品をご使用ください。

### グリップの握り方

#### 正しい杖の握り方



グリップの中心

#### 間違った杖の握り方



グリップの前すぎ



グリップの後ろすぎ



グリップの下すぎ

生命を包む世界品質  
**ACTION**  
JAPAN

輸入代理店／発売元

**アクションジャパン株式会社**

〒658-0046

神戸市東灘区御影本町2丁目9番16号 アクションジャパンビル

TEL：078-843-5417 / FAX：078-843-6817