

情報満載のホームページでお待ちしております!

床ずれ防止用具が主力製品のひとつである弊社は「床ずれゼロ」を目指しています。製品情報だけでなく、床ずれ防止に関する多くの研修資料や動画をご用意しています。是非、ご活用ください。

ポイント
1

床ずれの基礎知識や介護方法などを分かりやすく解説しています

床ずれの専門医学界「日本褥瘡学会」で理事や褥瘡対策用具推進委員長を務めておられた先生方に監修いただいた「床ずれの予防と介護」や、床ずれの二大要因の一つ「ずれ力」について分かりやすく解説をした資料を無料・無登録でダウンロードいただけます。



ポイント
2

床ずれ研修動画・資料を公開しています

弊社所属の福祉用具業界団体「JASPA」の床ずれ防止用具部会にて作成した「床ずれ防止用具の正しい選び方と使い方」を分かりやすく解説した動画や資料を無料・無登録でダウンロードいただけます。部会では、日本褥瘡学会や厚生省など監督省庁と連携し、床ずれ防止用具の普及活動に取り組んでいます。



ポイント
3

床ずれについて、あらゆるご質問にお答えします

ホームページに掲載している情報より更に詳しく知りたい皆さまへ、資料のダウンロードコーナーが便利です。また、ご購入後に紛失してしまった取扱説明書もご用意していますので、安心してお使いいただくことができます。ホームページ上部にあります「お問合せ」項目よりお問合せください。もちろん、お電話でのご質問も承ります。

ポイント
4

カタログや取扱説明書など、全てダウンロードしていただけます

専門研修を受けたスタッフはもちろん、世界67カ国に展開するアクショングループが蓄積したデータや、専門学会や認定看護師の方々など豊富な顧問相談員により、床ずれについてのご質問があれば、原則として3営業日以内にお答えさせていただきます。

ポイント
5

サンプル品ご提供など、万全のサポート体制でお待ちしています

カタログや研修用冊子はもちろん、実際にご試用いただくためのサンプル品を数多く揃えています。誰にでも使える万能な製品はなく、ご使用される方の身体状態や介護力などに応じて、それぞれに合ったものを選ぶことが大切と考えます。そのため、弊社製品がお客様のお体やご希望に沿うかどうかお試しいただくために様々なサンプルをご用意しております。カタログやサンプル品のご用命、お問い合わせはホームページ上部にあります「お問合せ」項目、もしくはお電話かメールでお気軽にお問い合わせください。

輸入総代理店/発売元

アクションジャパン株式会社

〒658-0046 神戸市東灘区御影本町2丁目9-16

アクションジャパンビル

TEL.078-843-5417 FAX.078-843-6817

アクションジャパン

検索



デモ品のご依頼、商品についてのお問い合わせは

自立支援型 **床ずれ防止** 用具

アクションパッド



福祉の先進国アメリカから愛をこめた贈り物

生命を包む世界品質
ACTION
JAPAN

高度な床ずれ防止性能と 抜群の安定感で 自立を支援するアクションパッド



これからの床ずれ防止用具は、ただ床ずれを防止するだけではなく、身体状況に応じた使い分けや、介護者の負担などを十分に考慮しなくてはなりません。

そのような点を十分に考えて開発されたアクションパッドは、床ずれ対策の基本機能はもちろんのこと、自立を支援するための抜群の安定感を兼ね備えています。


例えば、

ベッドでご使用の場合、安定感があれば、寝返りなど体を動かしやすいですし、身体の安定により介護の負担が軽減します。

車いすでは、圧力分散はもちろん、凹凸道でのショックを吸収し、不安感・不快感を取り除き、快適な座り心地により床ずれを防止します。

アクションパッドは、自立支援と床ずれ防止を同時に考えられる床ずれ防止用具なのです。

アメリカより愛をこめて 世界67カ国で信頼と実績の60年

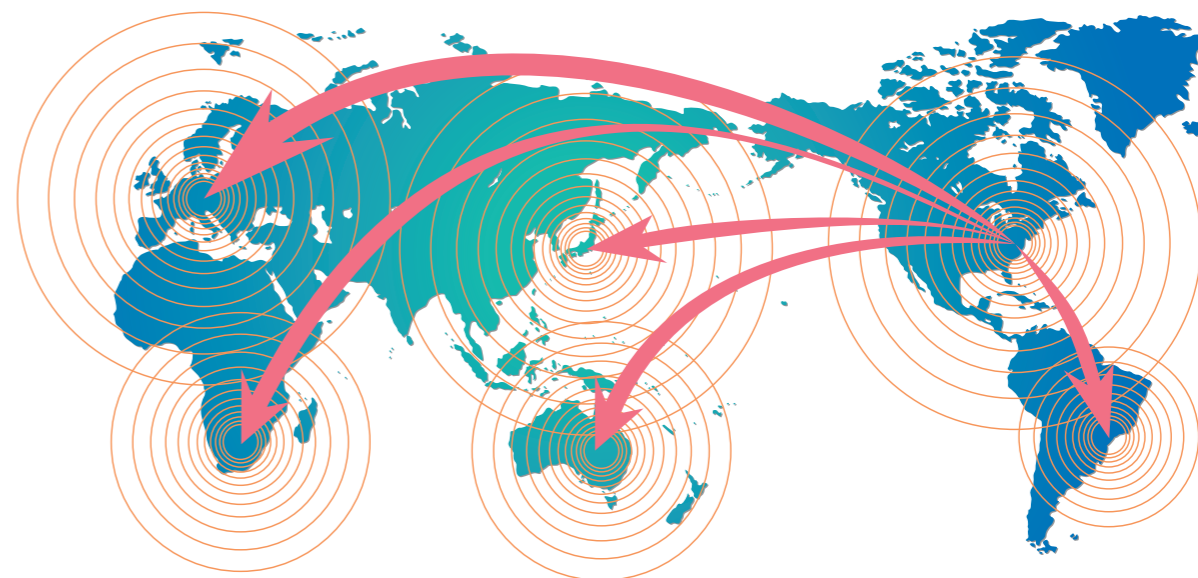

福祉の先進国アメリカで開発されたアクションパッドは、福祉研究の権威「ニューヨーク州立リハビリ研究病院」がエアマットやゲルタイプ、スポンジマットなど24種類の床ずれ防止用具について、様々な科学テスト、臨床テストを行なった結果、総合で最高得点を取得しました。

現在、アクションパッドはアクショングループ企業を通じて、世界67カ国に供給され、病院の手術室や病棟、あるいは自宅での床ずれ防止の決定版として世界中で愛用されています。




アクションパッドが誇る6つの特徴

ポイント1

3つの圧力分散能力


●象が乗っても底つきしない●

アクションパッド(厚さ2.2cm)を硬いテーブルの上に置いて、膝で全体重をかけたとしても、膝が硬いところまで行き着くことはありません。アクションパッドの底つきの限界は600kgと驚異的に高く、例えば象の片足ほどです。底つきは、それ以上圧力分散できないという限界を示し、簡単に底つきするようでは十分な圧力分散はできません。“**柔らかいのに底つきしない**”そんな不思議なアクションパッドは、いつも体を優しく支えます。

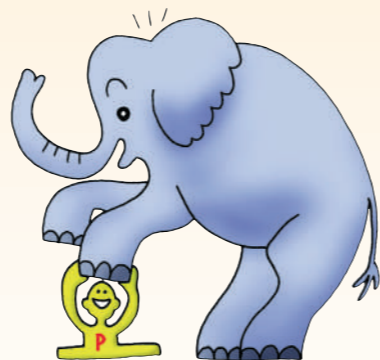


●押し込んでも硬くならない●

ゲルやシリコン系の商品の中には、押し込んだ時に材質そのものが硬くなってしまふものがあります。これでは体重がかかった時に底つきと同じような状態になってしまい、十分な圧力分散ができません。アクションパッドの柔軟性は、**どんなに押し込んでも損なわれることなく、いつも体を柔らかく支えます。**

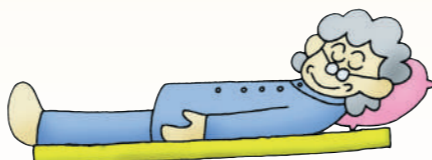

●押し返さない●

体重をかけた時の押し返す力は圧力ですので、床ずれの原因になってしまいます。エアーマット(空気圧)やウォーターマット(水圧)など押し返す力の強いタイプの商品は、その力を十分にコントロールする機能が必要ですが、押し返す力がほとんどないアクションパッドは、**使われる方に圧迫感を感じさせず、いつも体を快適に支えます。**

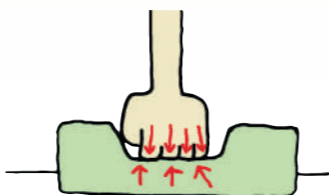

ポイント2

自立を損なわない安定性

エアーマットや低反発ウレタンフォームなどは、優れた実績があり多くの床ずれ防止用具に貢献してきました。しかし、そのクッション性は体動能力の妨げや、「ふわふわして落ちつかない」という不快感の原因となることもあります。圧力分散能力と自立とのバランスを重視するアクションパッドは、余分なクッション性をもたず、**ご使用者の体動やリハビリ運動、介護の妨げにならない安定性**で、床ずれを防止しつつ自立を支援します。



ポイント3

抜群の耐久性と経済性

試験所テストで25年間材質変化しないことが確認された**抜群の耐久性**を誇ります。万が一フィルムが破損しても、ゲルタイプ(コンニャクマット)のようにオイルや中身が流れ出たり型崩れすることはありません。また、1トンの重さを1ヶ月間かけ続けても、それを外すと5秒以内で元の形状に戻るという**驚きの復元性**がありますので、長期間お使いいただいても人の形に凹んでしまうことはありません。さらに電気代やメンテナンス費が不要なので、**とても経済的**です。

※ただし、紫外線を長時間受けると材質変化を起こします。

※試験所テストは、実際の使用環境とは異なりますので、25年間製品の材質を保証するものではありません。



※切ったり針で刺しても中身は流れ出ません。(切って使う商品ではございません)

ポイント4

お手入れが簡単で衛生的

石鹸での丸洗いや次亜塩素酸ナトリウムでの拭き掃除など、一般的な消毒液がすべて使えます。また、**耐熱性は-30℃から100℃までありますので**、温水での丸洗いも可能です。しかも失禁などによる臭いの付着もなく、表面処理をするだけで衛生的に使えます。

※ただし、薬液等に長時間浸け置きすると、フィルムがふやける可能性があります。



ポイント5

音なし、電気なし、故障なし

アクションパッドは、機械ではありませんので電源を必要としません。そのため**モーター音は一切なく故障も起こりません**。停電によってエアーマットが使えなくなった被災地などでも、相当数のアクションパッドが活用され、現在でも現役で活躍しています。



ポイント6

床ずれ原因の1つ「ずれ力」の軽減

床ずれについて様々な分野で研究が進み、床ずれとは圧力と「**ずれ**」が原因で発生することが分かりました。ずれは、仙骨座りや背上げ、体位変換などを行った際に発生します。

ずれについての詳しい説明は次ページより解説しております。

監修 芝浦工業大学 システム理工学部教授 米田 隆志


アクションパッドは、そのずれからご使用者様を守る製品です。体の下に敷くことで、ずれの発生と同時にアクションパッドが追随し、体に発生するずれ力を軽減します。

寝たきりの方には定期的に背抜きを行い、体にかかるずれを逃がす必要がございます。アクションパッドでずれ力が軽減されれば、介護者の負担を減らすことにも繋がります。



“ずれ”なくして床ずれは語れない

床ずれについて様々な分野で研究が進んだことにより、今までの常識を覆すような新しい事実が次々と報告されています。ここでは最新の研究で実証された「ずれ力の脅威」について、分かりやすくご説明します。

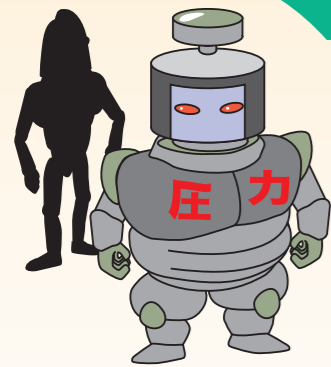

LESSON 1 床ずれの主な要因は圧力だけ?

長い間、床ずれの主な要因は圧力と考えられていました。「32mmHgを超えると毛細血管が潰れる=床ずれ発生」とされ、とにかく圧力分散が床ずれ防止の基本とされていたのです。

しかし、車いすなどに座った状態では、32mmHgどころか、とても大きな圧力が継続してかかりますが、座っている人すべてに床ずれができるわけではありません。

どうやら圧力分散だけでなく、何か他の要因を解決しても床ずれ防止に貢献できる、つまり**圧力以外にも床ずれ発生の大きな要因がある**ようです。

LESSON 2 「32mmHg以上=床ずれ発生」理論の危機って?


32mmHgという圧力は、350mlのペットボトルをさかさまにして、ふたの部分を下にして掌に置いたときに感じる小さな圧力です。

寝ている人や座っている人の仙骨などにかかる圧力を、すべて 32mmHg以下に抑えようとする、とても柔らかく厚みのある床ずれ防止用具を使用しなくてはなりません。

そのような商品を安易に使用するとどうなるでしょう?

ある程度、動いていた人がとても動きにくくなったり、介護がとてもやりにくくなったりしてしまうこともあります。

※もちろん、圧力分散を最優先に考えなくてはいけないケースもあります。

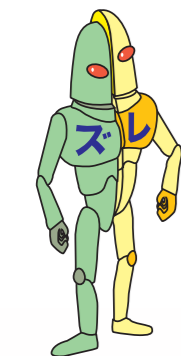

LESSON 3 せん断力ってなに?

近年の研究で、せん断力というもの、圧力と同じくらい床ずれの重要な要因であることが分かっています。

せん断力とは力学用語ですが、分かりやすく言い換えると、よくご存知の「ずれ力」のことです。

大きな圧力でも床ずれができないケース、それほど大きな圧力がかかっていないと思われるのに床ずれができてしまったケース。

「床ずれの主な要因は圧力だけ」と考えていては、説明のつかないケースがたくさんありました。

LESSON 4 もっと詳しくずれ力を知ろう!



ずれ力と摩擦とは、似ているようですが異なります。

皮膚の上で軽く指を滑らせてみてください。

圧力が相対していない状態で指を滑らせた時、皮膚に生じているのは摩擦です。

この状態では皮膚表面がこすられるだけで、皮膚内部で床ずれの原因となる血流不良を起こすことはありません。

では、指を押し当てながら滑らせてみてください。圧力を加えた状態で指を移動させた時に、皮膚も移動します。この皮膚を移動させる力がずれ力です。

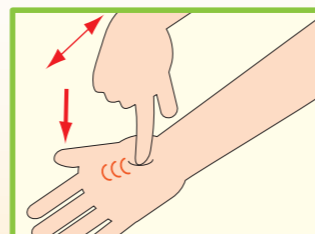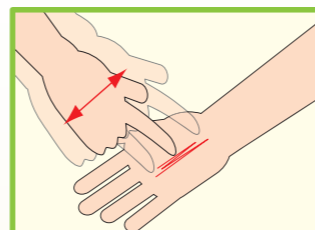

このずれ力が、皮膚の内部でどのような作用を起こし、それが床ずれ発生にどのような影響を及ぼしているのでしょうか。

人間の皮膚内部を卵豆腐、毛細血管を卵豆腐に貫通した穴で再現した模型イラストを使ってご説明します。

まず、卵豆腐を垂直方向に押し込んでみます。


かなり大きな力(圧力)を加えなければ、穴は潰れません。

次に、ずれ力を僅かに加えてみます。すると、少しの力で穴は潰れてしまいました。


このことから、卵豆腐を使った模型実験では、次のような仮説が立てられます。

圧力だけでは血管は潰れにくい

ずれ力が僅かでも加わると、血管は潰れやすくなる

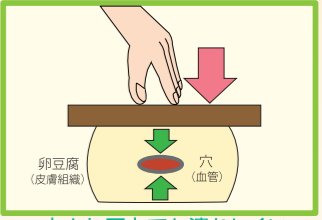

大きな圧力でも潰れにくい

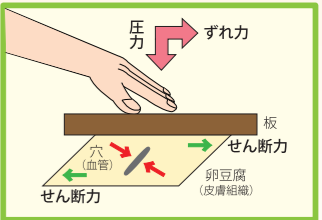


ずれ力が加わると
少しの圧力でも潰れる

LESSON 5 垂直方向の圧力だけなら恐るに足りず!

圧力をかけた状態で毛細血管血流を撮影することができる、特殊な機械を使用して実験をしてみました。するとラットの毛細血管1本に対して40mmHgの圧力をかけても毛細血管に変化はなく、血流は良好でした。そのまま圧力をかけ続けると、毛細血管の血流が止まったのは、なんと80mmHgでした!

80mmHgの圧力でやっと血流は止まる

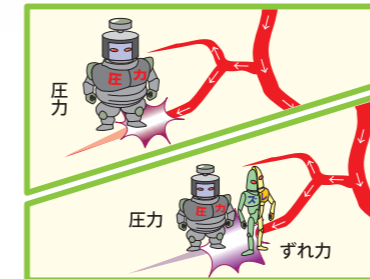

僅かなずれ力が加われば、
小さな圧力で血流は止まる

しかも、80mmHgでも毛細血管は閉塞していない、つまり必ずしもそれだけですぐに床ずれの原因となるとは言い切れない状態だったのです。

しかし**ずれ力を僅かに加えると、少しの力で毛細血管血流は止まる**ことが確認されました。

結論: 「床ずれの最大の脅威は、ずれ力が加わることです!」


すべての実験で、

- ・垂直方向の圧力では、毛細血管血流はなかなか止まらない。
- ・僅かなずれ力が加わると、少しの圧力で毛細血管血流は止まる。


ことが実証されました。

このことから、ずれ力は圧力と同じくらい床ずれの大きな要因となることが分かりました。

これからの床ずれ防止は、圧力分散だけではなく、ずれ力緩和も併せて考えていくことが大切なのです!

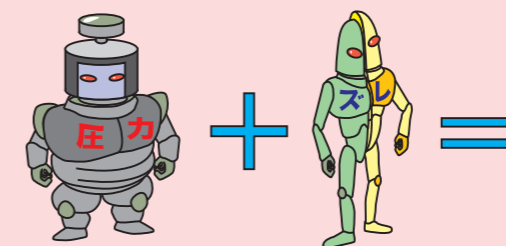

「最大の脅威!」

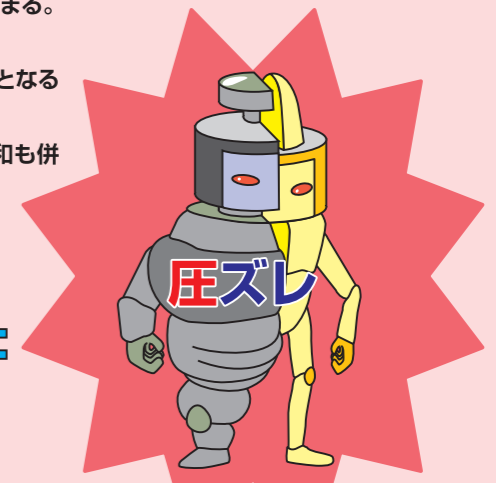

からだに優しい新素材 アクションパッドの優れた効果


圧力分散効果

アクションパッドは、エアーマットやスポンジタイプと比較すると圧力を分散させる機能に優れていることが判ります。ここで紹介しているのは、その実験結果です。スポンジと比較した結果、優れた復元力を発揮しました。また、体位交換などにおける荷重の変化には、ひずみ率、応用荷重率の高さで対応。不均衡な圧力分配による圧迫を防ぐ効果が実証されています。さらに、圧力分散比率の測定では、荷重を極限まで分散させ圧力を一点に集中させない優秀性が明らかになりました。全てのデータが示すように、アクションパッドは体圧を極限まで分散させることで、床ずれの防止に優れた力を発揮します。


蒸れ防止効果

アクションパッドは、熱のこもらない性質をもっています。通常の使用においては、パッド自体の温度が体温以上に上がることがなく発汗による蒸れを防ぎます。グラフ3は、介護用品と接する温度を示したものです。スポンジや空気タイプものは皮膚温が上がりすぎ、蒸れの原因となりかねません。ウォーターベッドでは、逆に皮膚温が下がりすぎ不快感を与える原因になっています。アクションパッドは皮膚温を適温のまま一定に保つので、いつも快適です。


※データは、すべてアメリカの公的機関による試験により得られたものです。

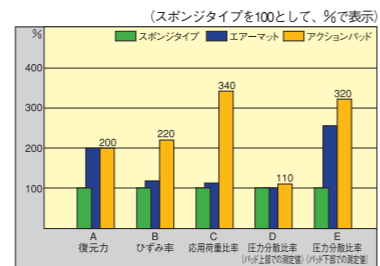

グラフ1 今までの介護用品との特性比率

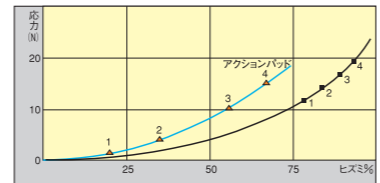

グラフ2 荷重一押し曲線 (グラフ曲線上の数字1~4は、クッション中央部下の圧力を示し、単位はPa (1Pa=52mmHg))

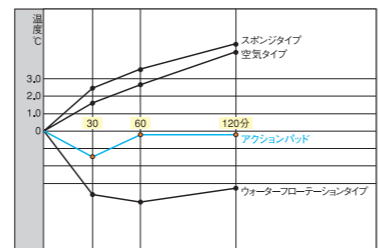

グラフ3 皮膚温度の変化

豊富なラインナップで 床ずれ防止をお手伝いします



車いす用アクションパッド

アクションパッドは、座った姿勢でお尻に集中してかかる圧力を分散するだけでなく、凸凹道でのショックを吸収し、快適な座り心地をご提供します。



#9000シリーズ

毎日長時間連続してお座りで、ご自身でお尻を浮かせたり姿勢を変えることができない方に適しています。汎用タイプの車いすに最も多い定番サイズです。120kgの方までお使いいただけます。

#9000 カバー付 ●介護保険レンタル対象商品
TAISコード 00428-000005

D40×W40×H2.5cm 重さ4.5kg
¥37,400(税抜¥34,000) 替えカバー: ¥6,380(税抜¥5,800)

#903838 カバー付 ●介護保険レンタル対象商品


D38×W38×H2.5cm 重さ3.8kg
¥37,400(税抜¥34,000) 替えカバー: ¥6,380(税抜¥5,800)

#903436 カバー付 ●介護保険レンタル対象商品

D36×W34×H2.5cm 重さ3.5kg
¥37,400(税抜¥34,000) 替えカバー: ¥6,380(税抜¥5,800)

#903030 カバー付 ●介護保険レンタル対象商品

D30×W30×H2.5cm 重さ2.5kg
¥37,400(税抜¥34,000) 替えカバー: ¥6,380(税抜¥5,800)

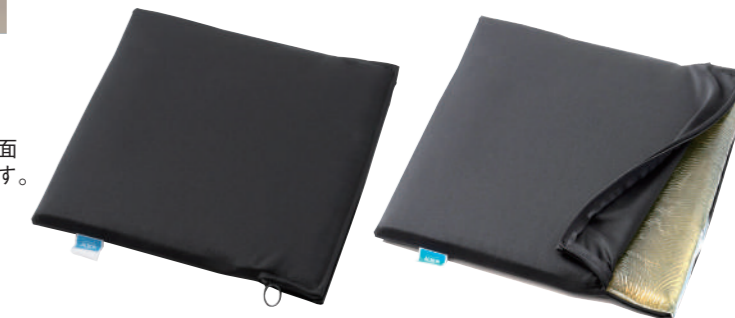

車いすカバーは裏面滑り止め加工付です。

現場の声にこだわるアクションパッド


床ずれ防止用具の優劣を判定する一つの手段として、圧力測定器による試験があります。しかし、測定器や研究機関が変われば全く違う結果が出てしまうことがあるばかりか、自社製品にとって都合の良いデータだけを掲載するという事もあり得ます。私たちは、アクションパッドを**最も公平かつ客観的に評価できる方法**がないか考えた結果、それは現場での臨床データであると確信しました。そこで95年から病院での臨床テストやご使用現場でのデータ収集を続け、現在までに国内だけでも8,000件以上の臨床データが収集されています。

圧力分散はもちろん、安定感や蒸れ対策、お手入れのしやすさなど、現場で要求される様々な項目が含まれていますが、**アクションパッドは総合で80%以上のケースで優れた評価を受けています。**

アクションパッド使用アンケート報告書 各項目別評価結果

このデータは、大学病院や老健施設をはじめ、その他の医療機関での8,000件以上の臨床試験結果と、ご購入頂きましたお客様のアンケートを集計したものです。

■ 大変良い ■ 良い ■ 同じ ■ 悪い

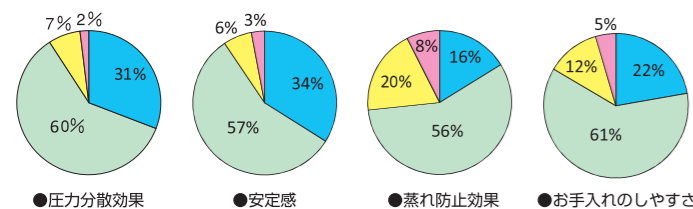

アクションジャパン株式会社 御中

神戸市立中央市民病院
看護部

ACTION PADの受託研究結果報告

試用場所：神戸市立中央市民病院

1. 受託研究結果
従来から使用している「エアーマット」「ビニールマット」と、貴社のACTION PADを比較した結果次の通りである。

電動式エアーマット	ビニールマット	ACTION PAD
部分的な圧力が、周囲にかり易い、凹凸がある。	部分的ではあるが、圧力は分散する。	広範囲にわたり一定圧力を分散する。
皮膚と接しているところが高温多湿になり易い。	皮膚と接しているところが高温多湿になり、蒸れる。	ほぼ一定の温度・湿度を保ち蒸れない。
使用中、空気の移動感により気分が不安定になる。	エアが容易に動くため体位が不安定である。設定位置がズレ易い。	安定感が得られる。位置がズレない。
エアが漏れる可能性がある。	エアが漏れる可能性がある。	中身が漏れることはない。
耐用年数が短い。	耐用年数が短く破れ易い。	半永久的である。
褥瘡ができる。	褥瘡ができる。	できていた褥瘡が軽減する。
高価である。	安価である。	高価である。

2. 総合的評価

- 褥瘡で苦しむ患者にとっては、従来の器材にはないメリットがあり好評である。ACTION PADそのものが蒸れないこと、安定感があること、などの理由で長期臥床患者でも快適な生活が送れる。
- 全身熱傷により皮膚の痙攣形成がある患者に使用したところ、褥瘡はなく、腰の痛みや腕のたるきも快適に得られた。
- 器材が重い上に柔らかいので片手の操作は難しい、器材独特の臭いがあり人によっては嫌う。エタノールアルコールで拭くと軽減した。
- 集中治療部・手術部等でも好評です。

以上

#7000シリーズ

アクションパッドと特殊ポリウレタンシート・天然ゴムシートの2層構造のハイブリッドタイプです。各部品はそれぞれ交換可能なので、ご使用中に破損・劣化があってもその箇所だけを交換するだけで済むので経済的です。



ずれ力の軽減効果はそのまま、軽量になりました。冬は冷えにくく、夏は蒸れにくいので、四季を通して快適にお座りいただくことができます。



厚みのある天然ゴムを使用することで、お尻が適度に沈みこみ、体圧分散能力が向上。お尻もしっかり保持されます。

#7000 特殊ポリウレタンシート+アクションパッド カバー付
●介護保険レンタル対象製品
TAISコード 00428-000047

D40×W40×H2.0cm(特殊ポリウレタンシート0.4cm+アクションパッド1.6cm) 重さ2.9kg
¥37,400(税抜¥34,000) 替えカバー: ¥6,380(税抜¥5,800)
特殊ポリウレタンシート: ¥4,400(税抜¥4,000)

#7500 天然ゴムシート+アクションパッド カバー付
●介護保険レンタル対象製品
TAISコード 00428-000048

D40×W40×H4.2cm(天然ゴムシート2.6cm+アクションパッド1.6cm) 重さ3.1kg
¥37,400(税抜¥34,000) 替えカバー: ¥6,380(税抜¥5,800)
天然ゴムシート: ¥4,400(税抜¥4,000)

ベッド用アクションパッド



※写真はベッド用スタンダード(#6100)になります。

カバー装着時

#6100 スタンダード カバー付

D43×W68.5×H2.2cm 重さ6.6kg
¥50,600(税抜¥46,000) 替えカバー: ¥2,420(税抜¥2,200)

#6600 ミドルサイズ カバー付

D68.5×W90×H2.2cm 重さ13.0kg
¥88,000(税抜¥80,000) 替えカバー: ¥4,620(税抜¥4,200)

#6300 ダブルサイズ カバー付

D68.5×W117×H2.2cm 重さ18.0kg
¥102,300(税抜¥93,000) 替えカバー: ¥5,280(税抜¥4,800)

#6303 ロングサイズ カバー付

●介護保険レンタル対象商品 TAISコード 00428-000004


D68.5×W188×H1.5cm 重さ23.0kg
¥110,000(税抜¥100,000) 替えカバー: ¥6,600(税抜¥6,000)



※写真はベッド用キュービックアクション(#6700)になります

キュービックアクションパッド

後傾姿勢がやむを得ない場合や、ギャジアップ(背上げ)・リクライニングの時間が長い場合などに、2cm四方のキューブとキューブの間にある5mmの溝が、圧力だけでなく斜め横方向のずれ力を効率良く分散します。

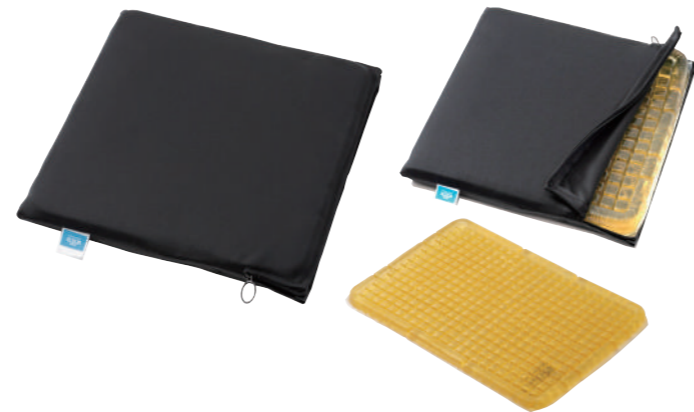

#9700 車いす用 カバー付 ●介護保険レンタル対象商品

TAISコード 00428-000008
D40×W40×H2.5cm 重さ4.1kg
¥47,300(税抜¥43,000) 替えカバー: ¥6,380(税抜¥5,800)

#6700 ベッド用 カバー付

D43×W68.5×H2.2cm 重さ5.8kg
¥62,700(税抜¥57,000) 替えカバー: ¥2,420(税抜¥2,200)

ちょこっとアクションパッド

お客様の強いご要望が形になりました。今までの生活で、ちょこっとだけ不安や痛みがあった場面で、薄くて小型のアクションパッドが床ずれ防止と快適性アップのお手伝いをします。

- ①ウレタンやエアセルタイプの車いす用クッションの底づき防止
- ②ソファや座布団とご一緒に
- ③ユニットバスのバスタブにかけてお尻の保護

多くの方がこのような使い方をされ、とても高い評価をいただいています。



ちょこっと
アクションパッド

#40408 カバー付

D35.5×W23.5×H1.3cm
¥18,700(税抜¥17,000) 重さ1.1kg
替えカバー: ¥2,640(税抜¥2,400)

便座用アクションパッド

シャワーや温座付など便座の快適性は向上しましたが、座り心地は改善されることなく、痩せ気味の方や長時間トイレを利用される方には悩みの一つでした。アクションパッドは、こんなところでも快適な座り心地を実現し、心安らくトイレタイムをお届けします。また、ポータブルトイレやシャワーチェアでもご利用いただけます。



〈#3200カバー 取付例〉
裏面吸着テープ付き。
体重がかかると便座とパッドが固定され、すべり止め効果を発揮します。
※カバーの仕様は予告なく変更することがございます。



#3200 カバー付

D42×W(片側)10×H2cm 重さ(片側)0.9kg
¥20,680(税抜¥18,800)
替えカバー: ¥3,080(税抜¥2,800)



#3300 カバーなし(裏面マジックテープ付)

D42×W42×H1.5cm
穴の大きさ 21×31cm 重さ1.9kg
¥20,680(税抜¥18,800)

平状アクションパッド

ウレタンフォームの底づき防止として併用するなど、汎用性が高いパッドです。ロール状に巻いて使用することもできます。大きさ・厚みで4種類ご用意があります。



#40402

D23×W28×H1.0cm
¥18,700(税抜¥17,000)

#40403

D28×W43×H0.6cm
¥22,000(税抜¥20,000)

#40404


D51×W56×H1.3cm
¥68,200(税抜¥62,000)

#40120

D31×W66×H1.3cm
¥35,200(税抜¥32,000)

特浴用アクションパッド


「特殊浴槽での入浴をさらに快適に！」そんな現場の皆様のご要望を形にしました。水分、温度、薬液に強いアクションパッドだからこそできた特浴用パッドは、背中や腰の痛みを緩和するだけでなく、円背の方の体位保持など、快適と安全をサポートします。

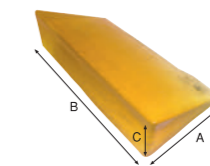

#40690 大サイズ カバー付

D20(A)×W40(B)×H10(C)cm
重さ: 4.7kg
¥48,400(税抜¥44,000)
替えカバー: ¥2,640(税抜¥2,400)


#40690(カバー付)

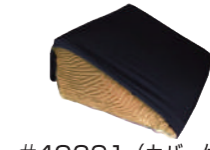

#40691 小サイズ カバー付

D20(A)×W20(B)×H10(C)cm
重さ: 2.4kg
¥37,400(税抜¥34,000)
替えカバー: ¥2,200(税抜¥2,000)

#40691(カバー付)

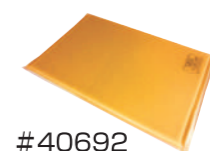

#40692 平状 カバーなし

D45×W30×H1.3cm
重さ: 1.9kg
¥21,450(税抜¥19,500)

#40692

頭部用アクションパッド

中央にくぼみのあるまくら型パッドです。枕としてはもちろん、幅広くお使いいただけます。

*重量のかかる臀部・腰部等へのご使用はお避けください。



#40200は
ウレタンとの2層構造です。

#40200

D23×W25×H5.7cm
(アクションパッドH2.5+
ウレタンフォームH3.2cm)
¥27,500(税抜¥25,000)
※外側のフィルムカバーを
やぶらないでください。



#40207

D23×W25×H2.5cm
(中央くぼみH0.8cm)
¥24,200(税抜¥22,000)

かかと用アクションパッド

マジックテープで固定するタイプで、使用方法も簡単です。1個からご購入いただけます。



#40401

D33×W20×H1.3cm
¥28,600(税抜¥26,000)
※価格は片足分となります。

お客様の声

弊社では、アクションパッドをご購入のお客様にアンケート調査を行っております。多数いただいている全国のお客様のご感想の中から一部を掲載いたします。(敬称略)

●東京都立光明学園
肢体不自由児養護学校では、子供達の椅子を製作する際、仙骨や背骨が当たる部分のクッション材に苦勞していました。しかし、アクションパッドと出会えたおかげで、それらの問題も解決できたので、今ではとても感謝しています。

●新宿小田急百貨店 介護用品売り場
正直言ってアクションパッドは高価な商品なので、お客様にその良さをなかなか簡単に理解していただけません。しかし優れた圧力分散効果があったり、耐用年数が高いという事を説明しお客様に納得して購入していただいております。

●鹿屋在宅支援診療所
いつも安心して愛用しています。薄めのカバーのある商品は、車を長時間運転する看護師にも好評です。自分自身腰が悪く腎筋群が萎縮し、どこに行くにも持っています。

●三澤 央子
子供が使用。体幹機能障害で姿勢が保てないためか、臀部の片側が赤くなったり、座面から滑り気味になっていました。今回車椅子と合わせて購入したところ、赤くなったりせず、ホールドもとても良いので、本当に嬉しいです。

●京浜病院
車椅子使用の患者が仙骨部に褥瘡ができ、どのような処置でも改善されなかったが、貸出用アクションパッドを2週間使用で著明に改善。返却後悪化。購入し使用したところ、良好で効果に驚いている。

●日本医科大学武蔵小杉病院
長時間の同一体位を強いられる手術室では、循環障害の予防にアクションパッドが大変役に立っています。価格が安ければ、数を増やし全ての手術患者に使用したいと思っています。

●井草 昭
腰部の手術後、30%程度しか痛みが軽減しなかった。通院の為の運転で、振動による痛み防止のため、5種類のクッションをテストしましたが、アクションパッドがベスト。片道2時間の道のりも往復可能で、愛用しています。

●西条中央病院
当手術室では、色々な素材を使ってクッションや枕を作っていますが、アクションパッドは一番評価が高く、除圧効果も証明することができました。アクションパッドの良い点は、素材だと思えます。

●聖フランシスコ病院
使用前は、半信半疑でしたが、腹臥位、側臥位の症例を始め、長時間の手術でも発赤すら残らないといった現状です。驚くほどの効果にスタッフ一同満足しており、今では必需品となっています。

●福島県福島市 佐藤 壮太(母 敏子)
尾てい骨が床にあたり、度々泣いて訴えておりましたが、使用後は、夜中に目を覚ますこともなくなりました。入院時に持参すると、看護婦さんやお医者さんが、とても良いものを使っていると感心していました。

●札幌社会保険総合病院
病院の手術室において、7時間くらいの手術をした患者さんの頭部に褥瘡が発生し、頭部用のパッドを購入しました。麻酔科医師からも他のアクションパッドの購入も考えたい、と評価がとても良いです。

●特別養護老人ホーム 小淀ホーム
床ずれが治ってもすぐに出来てしまう利用者なので困っていました。アクションパッドは、床ずれ防止に非常に役立っています。すべり止めにもなりますし、利用者にとって、とても良いものだと思います。

●日本伝承医学治療院 院長
20年前から当院では、仙骨や尾骨の痛みで仰向けにできない方や、リウマチ・筋萎縮症などで関節や骨に痛みがある方の施術時にアクションパッドを用いています。敷くことによりかなり痛みを軽減できます。

●大阪府堺市 櫻木 智恵子
平成9年から寝たきり状態で、側臥位時の耳用パッドを探していました。その時病院のICUでアクションパッド枕型を発見。購入し看護に力を得ました。感謝しています。

●大阪府大阪市 阿部 廣行
いろいろな商品を試しましたが、効果を得られなかった。3ヶ月使用後、皮膚科医が驚くほど改善しました。十分な栄養補給や体位交換、身体を清潔に保ち、アクションパッドを使用することが床ずれ予防の鉄則だと思います。

●弘前さくらクリニック 産婦人科
手術時に手術台の上にパッドを敷いています。手術台は硬いので、今まで患者さんの背部、腹部にかかっていた負担が軽減したように思います。以前手術後仙骨部周囲にできていた発赤も、パッド使用後はなくなりました。

●和歌山県和歌山市 大竹 信吾
エアーマット等では自分が不安定で、高さがあるので介護者も大変でした。ホームナースさんから勧められ、お尻の左右からパッドを差し入れて使用していき、非常に快適で、お尻の状態も良くなり、毎日の必需品となりました。

●広島県廿日市市 菅梅 房枝
寝たきりの義母にとって、外出時の強い味方となりました。品質が優れていることを承知で購入しましたが、一般的にもっと知られるようになることを望みます。もっと情報が拡がり、価格が手頃になれば、と思います。

●千葉県がんセンター
使用者は悪性リンパ馬尾神経障害。しびれの軽減にも効果があった。また便通時、座骨の痛みの軽減にも顕著に効果を示し、感謝しております。

●東京都 ルーククリニック
遠赤外線による全身温熱治療中に、頭部のみ使用しています。アクションパッドを使用後、循環障害による副作用は激減しております。今度は熱傷予防の為、75度のBOXの中でも仙骨や踵骨部に使用してみたいと思っています。

●千葉県 館山特別養護老人ホーム
薄いの体圧分散効果があり、利用者も満足しています。また、ずれたりめくれたりしない為、使い勝手も良く、汚れた時の手入れも簡単な為、職員も満足しています。

●松本 頼子
使用1日目にして痛みが軽減し、手放せなくなりました。様々な商品を経験し、アクションパッドに行き着くまでに時間がかかりました。一般の人が手にし易いよう、身近な所で販売して頂ければと思います。

●田中外科医院
腹臥位による外来手術や処置があり、その度に呼吸の確保に困っていました。販売店に相談したところ、アクションパッドを勧めていただき現在使用中です。長時間同じ体位の固定ができ、更に呼吸抑制がなく使用できています。

●神奈川県川崎市 神林 弘
アクションパッドを試して、これなら大丈夫と確信を得ました。車椅子に比べて1年近く経ちますが、何の問題もありません。また特注で『ひじあて』を作りました。食事やゲームの際に欠かせません。

安心してお求めいただくための アクションパッドQ&A

Q.1 重さはどうですか？

A. 一度ベッドの上などに敷くと、敷いた状態のままでお手入れができるので持ち運びが少なく、それほど問題ではなかったとのご意見が多いです。薄くすると軽くなりますが、アクションパッド本来の性能が発揮できなくなってしまうので何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

Q.2 蒸れませんか？

A. アクションパッドには通気性はありますが、熱がこもらない特性がありますので、長時間お使いになっても皮膚温を上げることがほとんどなく蒸れにくいです。

Q.3 冷たくはないですか？

A. アクションパッドは熱がこもりませんので、冬場など温度が低いと冷たくなりますが、逆に夏場は熱のこもる素材に比べてとても快適です。冷たい時は室内で温めてからご使用されるか、電気毛布等をお使いください。一度温まるとすぐに冷めたり体温を奪うようなことはありません。

Q.4 何でできているのですか？

A. AKTON®という液体成分を一切含まない超柔軟性特殊素材(ラテックスフリー)です。これは、柔軟性や伸長性、復元性、耐熱性、耐薬品性、耐久性などに優れています。また、フィルムと一体化しているので、体をねじっても皮膚を引っ張らず、ずれを軽減することができます。

Q.5 ゲルタイプとは違うのですか？

A. 一見ゲルタイプに似ていますが、材質的にも機能的にも全く違います。ゲルタイプとの違いは主に次の3点です。
1.ゲルの多くはフィルムが破れると中身が漏れますが、アクションパッドはそのようなことはありません。また3年程度で経年変化を起こすゲルに比べてアクションパッドは試験所テストで25年の耐久性が確認されています。
2.ゲルの多くは50℃程度で溶けだしますが、アクションパッドは100℃まで耐熱性があります。
3.ゲルは局所的な圧力がかかると周辺に逃げてしまい底づきの原因となりますが、アクションパッドは600kg(2.2cm厚)まで底づきを起こしません。

Q.6 お風呂場で使えますか？

A. ご使用いただけます。浴槽の中に沈めてのご使用も可能です。濡れると表面が滑りやすくなるので転倒しないようご注意ください。ご使用後は水気を拭き取り、直射日光の当たらない風通しの良い場所で保管ください。

Q.7 お手入れはどうすればいいですか

A. ・アクションパッド部分：石鹸・アルコール・次亜塩素酸水
・ウレタン部分：アルコール等
で清拭ください。浸け置きや表面に薬剤が付着したままにならないようご注意ください。天然ゴムは水洗いをし、水切りをして、よく陰干しください。
カバーは洗濯表示に従い、洗濯を行ってください。

Q.8 カバーは必要ですか？

A. カバーはご使用ください。本体の劣化を防ぐのと、汗をかいた状態でアクションパッドが直に触れたまま、長時間使用すると表皮剥離するおそれがございます。カバーがない場合は、伸縮性のある肌触りのよい生地などを上にゆったりと被せてご使用ください。

Q.9 他に比べると価格が高いのでは？

A. 確かに他社のゲルタイプなどと比べると1~2割程度高いようです。しかし、その優れた性能と耐久性を考えると、皆様にご満足いただけるものと確信しております。

Q.10 フィルムが破れたらどうすればいいですか

A. 専用の補修フィルムをご用意しておりますので、弊社もしくは販売店までご連絡ください。軽微な破損でしたらお客様でも補修できます。

Q.11 購入前に見る・試すことは可能ですか

A. デモ機をご用意しておりますので、弊社または販売店までご連絡ください。実際にお使いいただいております。

Q.12 車いす用アクションパッドはどれを選べばいいの？

A. 車いす用アクションパッドは体格や身体状況に合わせてお選びいただけますと幸いです。下記を参考にしながらお選びください。
9000・・・どなたでもお使いいただけます
体重のある方でも大丈夫です
9700・・・仙骨座りや円背のようにずれがかりやすい方
7000・・・持ち運びが多く、お尻の冷えが気になる方
7500・・・お尻の接触面積を増やしたい方



アクションジャンルの企業姿勢

弊社は、乗馬用具の専門商社として国内最大手、世界でも五指に入る貿易会社から国内事業部が独立して設立されました。貿易会社として培った能力と海外10数カ国100社近くに及ぶビジネス・ネットワークを活かし、福祉分野で日本より10年以上先行すると言われる欧米各国を中心に情報交換を行っています。①確かな販売実績がある、②サポート体制が整っている、③日本になかったか、或いは品質

や特長などで従来品を大きく上回る、④現場で強い要望がある、⑤愛がこもっている。それらすべてを満たした素晴らしい商品だけを厳選して日本の皆様にお届けします。これからもこの基本姿勢を変えることなく、国内約150社のビジネスパートナーと連携し、「より快適でより安全な生活のご提供」のためにアクション(考動)を起こしていきます。

ISO世界規格に適合した安全性と耐久性が魅力
アクション歩行器シリーズ

折りたたみ式歩行器
国内20年以上の販売実績がある人気シリーズ
C2021(C/S/SS)

折りたたみ式・キャスター付歩行器
3種類のキャスターをご用意
R/MR/LR

折りたたみ式・立ち上がり歩行器
椅子やトイレからの立ち上りを、二段式フリップがしっかり応援
C2021W(CW)

折りたたみ式・交互歩行器
歩幅に合わせて左右のフレームを交互に移動
C2023(C)

強い
安全のために
強度と耐久性の高い高品質アルミを使用。特に負荷のかかる脚連結部は、二重パイプ構造でより耐久性を高めています。

優しい
滑らず柔らかい特殊ラバー
グリップに採用した特殊ラバーは耐久性に優れ、洗浄・消毒がしやすく、病院・施設・レンタルに最適です。

便利
ボタン一つで簡単折りたたみ
折りたたんだあとは、幅約10cmの狭いスペースに納まります。

医療・介護・食品・クリーンルーム用ワークシューズ

クロックライト



長時間の立ち仕事、しかもデリケートな作業を要求される手術室のプロスタッフをサポートするためにデザインされたワークシューズ、軽く安定感のある履き心地、足・膝の負担を軽減する疲れにくい設計、衛生面を配慮した抗菌消臭仕様など、安全・清潔にとことんこだわった商品です。その優れた機能性と安全性は、介護現場での入浴介助や食品工場、クリーンルームなど、医療以外の様々な分野でも高い評価を得ています。

爪先までフルカバーで足を守る安全形状
運動性を高め疲れにくい踵部デザイン
滑りにくく、安定感に優れたガーター(溝)付フラットソール
底部ベンチレーションで蒸れにくく、洗浄・乾燥も簡単

転落や転倒による衝撃を緩和する

ワンダーマット



アルティマテリアルシリーズワンダーマット **超薄型衝撃吸収マット**

POINT 1 5ミリ厚でも！
転落・転倒の衝撃を緩和！

POINT 2 5ミリ厚だから！
段差が気にならない！

転倒時大腿骨頸部骨折をシミュレートした衝撃試験データ
ワンダーマット設置有無

無	有
3.59	2.47
	低減率31.2%

マットの3辺が斜め加工されているので歩行や車いすの走行を妨げません。

厚さ5ミリ

*高齢者転倒転落ダメージ対策協議会推奨の試験方法で、名古屋大学研究室が計測した数値の平均を示しました。

ポジショニングクッション

アルティ「思いやりクッション」シリーズ

- 1 丸洗いでできる
- 2 思いやり縫製※
- 3 お手入れがラクな撥水加工のカバー
- 4 すぐれた通気性の中材



※角の部分が縫い目にならないように少しずらした縫製。縫い目の硬い部分が体にあたる、こすれる時の負担を和らげています。
*実用新案取得済み

レスト60

60°側臥位や背腎位(はいでんい)の際、体の下に布を敷き込む事で安定した姿勢を保ちます。



アンクル

足首のすきまなどに、自然に優しくフィットします。



フェイス

中央部の穴は、伏臥位の下向きでは目、鼻、口。横向きでは耳を入れて安定した姿勢が保てます。



強さの極み

当たり前前の安全、実は世界トップレベル

折りたたみ式 **シャワーチェア**



毎日使うものは、強く安全なものがよい。では、700kgの荷重試験をクリアしたこの商品を！
※垂直圧の荷重試験700kgクリア(外部検査機関にて試験)

手術室やクリーンルームで
ご要望の多い機能を全て備えた！

クロックスター

135°Cの耐熱性

優れた防滑性

帯電防止機能

抗菌消臭効果

蒸れ防止通気孔

オートクレープ対応
●カラー/ホワイト

ディスプレイブルクッション製品

ベント S



U字形状で、体圧分散力UP!

『ベントS』は独立行政法人国立循環器病研究センター看護部のノウハウを基に開発されたディスプレイ製品です。

U字形状により、部位を包み込む形で接触面積を増やし体圧分散力に優れています。かかとをはじめ、様々な部位にご使用いただけます。



「繊細な癒し」を提供いたします
アームレストクッション

ぽっくん



3つの膨らみが心身を安定させます

上部には3つの膨らみが付いています。真ん中は低反発ウレタンでできており優しい触り心地。外側2つは指先や掌を刺激する高弾性ウレタンです。この2つの性質の膨らみは、握ることによりリハビリや心的安定効果が期待できます。また、外側の膨らみは腕の落下を防ぎますので、安心してお使いいただけます。

尾骨、座骨、腰椎への負荷が少なくなります

「ぽっくん」に体重を預けることで、重心が前方に移動し、太ももの接触面積が広がって圧力分散効果がUPします。円背の方や腰に不安を抱えている人も、楽な姿勢を取ることができ、車いすからの転落も防いでくれます。

