

## 1. 原則として平面を上にしてお使いください

すやりには、平面と波面があります。平面は圧力を均等に分散することに、波面は手術台が傾斜している場合などに発生する“ずれ力”や“歪み”を吸収・緩和することに長けています。

痩せ形の方が、傾斜45度以上の体位をとる場合など、皮膚にかかるずれ力を吸収するため波面を上にする方が良いこともあります。原則として平面を上側にお使いください。




## 2. 適当な生地を併用してください

他のウレタンと同様に、すやりも身体に直接接触すると、擦過が生じる可能性がありますので、適当な生地を併用していただくことをお勧め致します。カバーの素材によっては、圧力やずれ力の分散性能を大きく落とす場合がありますので、お選びいただく際には、下記をご参考にしてください。


- ・縦横、またはいずれかに伸びる
- ・手の甲を縦横に滑らせて、いずれもザラザラ感がない
- ・薄手の生地(分厚い生地は、すやりの圧力・ずれ力の分散性能を落としてしまいます)

また、カバーの余り生地をマットレスの下に巻き込むと、カバーが張ってしまい圧力の分散性能を大きく落とす原因になります。余り生地はそのまま下に垂らすか適切な長さにカットしてください。

余り生地を下に垂らす

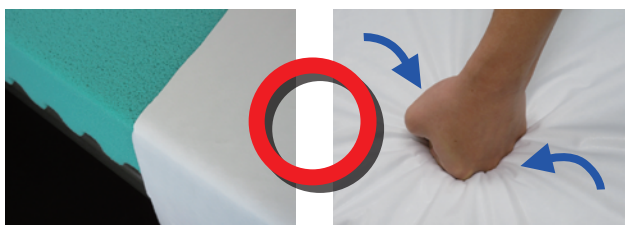

余り生地を下に巻き込む

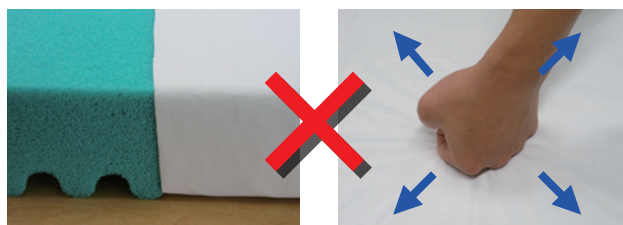

## 3. 用途に合わせてカットすることができます

すやりは、切れ屑がほとんど出ず、断面がきれいに整い易いので、用途に合わせてカットしていただくことができます。

カットの際は、ハサミよりも、カッターナイフの方が切り易いです。カッターナイフを使用される際は、

- ① すやりの厚みより、やや長めに刃を出して
- ② 斜め45度くらいの角度で
- ③ 手前に滑らすようにカットしてください。

カッターの刃を出し過ぎたり、左右に力が片寄ると、刃が折れて受傷事故の原因となりますので、十分にご注意ください。



## 4. お手入れの際は、下記についてご注意ください。


- ①生理食塩水などが付着した場合は、術後に丸洗いができます。洗浄後はタオルなどで水気を取り、日影干しで中まで十分に乾燥させてください。(カビの発生原因となります)
- ②乾燥機等をお使いの場合は、設定温度を60℃までにしてください。
- ③保管状態、ご使用期間によって、変色をすることがありますが、基本性能には影響しません。
- ④長時間、紫外線が当たると変質をします。
- ⑤メーカーテストでは、1%の次亜塩素酸ナトリウムに60分間浸け置きをしても変質をしませんでしたが、高濃度エタノールは一時的に膨張することがありますので、浸け置きをしないでください。
- ⑥LGAによる8万回圧縮テストで約99%の復元性が確認されていますが、曲げた状態で荷重をかけると裂けることがあります。



①



②

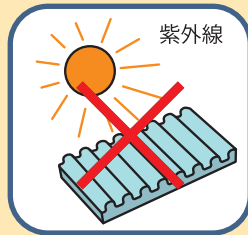

④



⑤



⑥

## その他の取扱商品ご紹介

### 床ずれ防止用具 アクションパッド

世界67カ国で信頼と実績の50年。  
あらゆる用途に合わせて、100種類以上の  
様々な形状を取り揃えています。



### 病棟・在宅ベッドマットレス すやり

元は国内数万枚の販売実績を誇る快眠マットレス。  
その圧力・ずれ力の分散性能を更に高めました。

定価 ¥54,780(税込) / ¥65,780(税込)

### 手術室用 クロッグライト



手術室用シューズとして、年間数万足の販売実績が  
あるクロッグライトの主な特長

- ①片足約100gと非常に軽くて楽ちん
- ②滑り難く安定感に優れたフラットソール
- ③抗菌、消臭効果がいっまでも持続
- ④環境に優しい無公害素材EVA製
- ⑤運動性を高め疲れ難い3Dミッドソール

定価 ¥3,960(税込) 22~28cm

生命を包む世界品質

**ACTION**  
JAPAN

医療・介護業界  
発売元

アクションジャパン 株式会社

〒658-0046 神戸市東灘区御影本町2丁目9-16

アクションジャパンビル

TEL.078-843-5417 FAX.078-843-6817

アクションジャパン

検索



●商品についてのお問合せやモニター品のご要望は