


# FY9991/FY9993

この度は、弊社商品をご購入頂きまして、誠にありがとうございます。  
下記の組み立て方法をよくお読みになり、ご活用ください。

## 脚の組み立て方法

※写真はFY9991を  
使用しています。

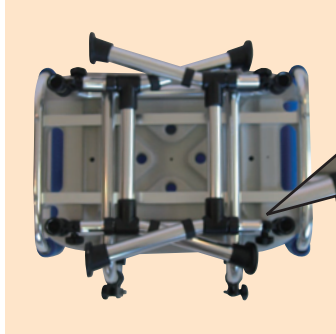

①箱から商品を取り出し、矢印で示されている部分にあるつまみを緩めます。(両脚、4箇所)



②脚を持ち上げながら矢印で示されている穴に差し込みます。(両脚、2本)



③それぞれの脚がしっかりと奥まで差し込まれたのを確認し、つまみを締めて固定します。(両脚、4箇所)

## 背もたれの組み立て方法



①椅子を起し、矢印で示されている部分にあるつまみを緩めます。(左右、2箇所)



②背もたれを持ち上げながら、矢印で示されている穴に差し込みます。




③背もたれがしっかりと奥まで差し込まれたのを確認し、つまみを締めて固定します。(左右、2箇所)




④脚を外側に軽く押し出すと、安定度が増します。

## 高さ調整方法

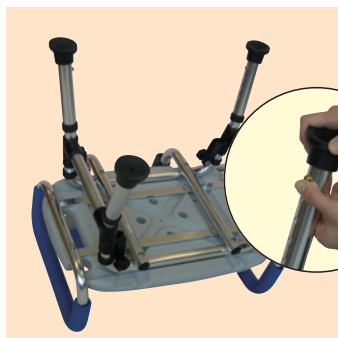

①パイプ脚についている金色のボタンを押しながら、お好みの高さの穴に合わせてください。

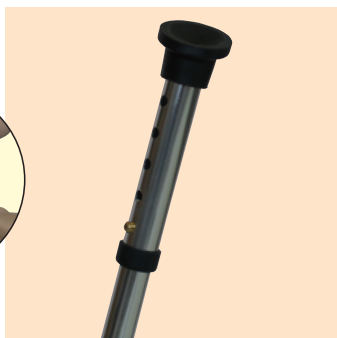

②金色のボタンがしっかりと固定穴から出ているのを確認してください。(両脚、4箇所)



③脚を引っ張っても抜けなければ、完了です。  
※安全性の関係で、4脚とも同じ高さに調整してください。


## その他の主な取扱商品

<各商品とも専用カタログを用意しておりますのでご請求ください>

現場の要望を形にしました

## 特浴用アクションパッド

「特殊浴槽での入浴をさらに快適に！」そんな現場の皆様のご要望を形にしました。水分、温度、薬液に強いアクションパッドだからこそできた特浴用ポジションナーは、背中や腰の痛みを緩和するだけでなく、円背の方の体位保持など、快適と安全をサポートします。

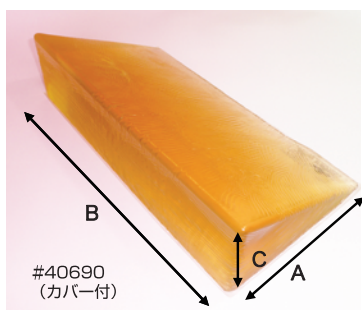

#40690  
(カバー付)

大サイズ(カバー付) 品番 #40690  
サイズ: 20(A)×40(B)×10(C) cm  
重量: 4.7Kg

小サイズ(カバー付) 品番 #40691  
サイズ: 20(A)×20(B)×10(C) cm  
重量: 2.4Kg



#40691 (カバー付)

平状(カバーなし) 品番 #40692  
サイズ: D45×W30×H1.3cm  
重量: 1.9Kg




#40692

円形(カバー付) 品番 #40695  
サイズ: φ31×H1.1cm  
重量: 0.9Kg



#40695 (カバー付)

※実際のご使用例

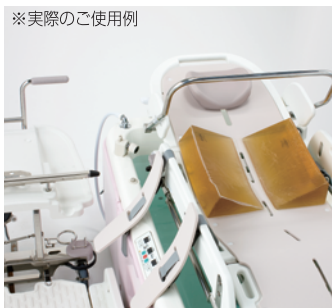

## ISO世界規格に適合した安全性と耐久性が魅力 高品質歩行器シリーズ

### 折りたたみ式歩行器

国内20年以上の販売実績がある人気シリーズ



C2021(C/S/SS)

### 折りたたみ式・キャスター付歩行器

歩行をさらに楽にする3種類のキャスターをご用意



R / MR/ LR



### 折りたたみ式・立ち上がり歩行器

椅子やトイレからの立ち上がりを、二段式グリップがしっかりと応援



C2021W(CW)

### 折りたたみ式・交互歩行器

歩幅に合わせて左右のフレームを交互に移動



C2023 (C)



### 強い

150kg垂直荷重テスト合格



強度と耐久性の高い高品質アルミを使用。特に負荷のかかる脚連結部は、二重パイプ構造でより耐久性を高めています。

### 優しい


滑らず柔らかい特殊ラバー



グリップに採用した特殊ラバーは本体同様耐久性に優れ、洗浄・消毒がしやすく、病院・施設・レンタルに最適です。

### 便利

ボタン一つで簡単折りたたみ

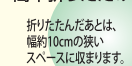

折りたたんだあとは、幅約10cmの狭いスペースに収まります。



ご購入求めの商品につきまして、ご質問・ご意見などがございましたら、何なりとお申し付けください。

生命を包む世界品質

**ACTION**  
JAPAN

企画開発・輸入発売元

**アクションジャパン株式会社**

〒658-0046神戸市東灘区御影本町2丁目9-16

アクションジャパンビル

TEL:078-843-5417 FAX:078-843-6817

# HS2070/HS2110


この度は、弊社商品をご購入頂きまして、誠にありがとうございます。  
下記の組み立て方法をよくお読みになり、ご活用下さい。

## 脚と座面の組み立て方法

※写真はHS2070を  
使用しています。




①まず、箱から商品を取り出して下さい。

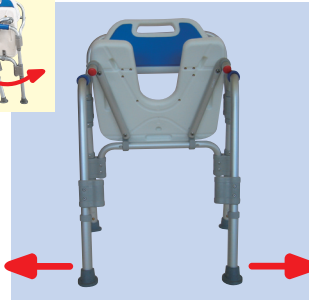

②脚を矢印の方向へ外側に開きます。



③両脚が開いたら、座面をゆっくりと下ろします。

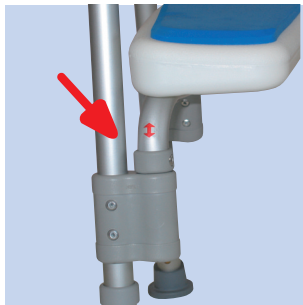


④下ろした座面のパイプ部分を、矢印で示された穴へしっかり差し込みます。



⑤パイプ脚と座面がしっかり固定されていることを確認し、完了です。

## 高さ調整方法

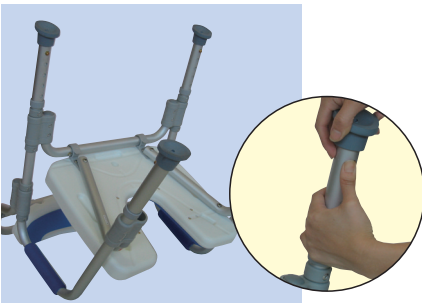

①パイプ脚についている金色のボタンを押しながら、お好みの高さの穴に合わせて下さい。



②金色のボタンがしっかりと固定穴から出ているのを確認して下さい。  
(両脚、4箇所)



③脚を引っ張っても抜けなければ、完了です。  
※安全性の関係で、4脚とも同じ高さに調整して下さい。

お買い求めの商品につきまして、ご質問・ご意見などがございましたら、何なりとお申し付け下さい。

生命を包む世界品質  
**ACTION**  
JAPAN

企画開発・輸入発売元

**アクションジャパン株式会社**

〒658-0046神戸市東灘区御影本町2丁目9-16

アクションジャパンビル

TEL:078-843-5417 FAX:078-843-6817