

ポジショニングクッション アルティ『思いやりクッション』シリーズ

テーマカラーの「ライト・グリーン」は【希望・好奇心・ユーモア・やすらぎ】これらの介護の現場に必要な心理効果に期待を寄せて用いています。

①丸洗いでできる



OK!

OK!


カバーを付けたまま、洗濯機や浴室のシャワーなどで丸洗いができます。

乾燥には専用の「乾燥ネット」(別売)がおすすめ。

②思いやり縫製 *実用新案取得済み

一般的なクッションの縫い目は角に!

アルティクッションの縫い目は少しずれています。

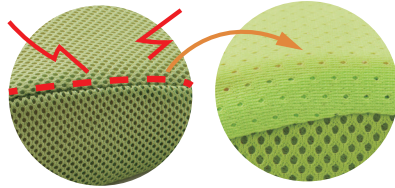

角の部分が縫い目にならないように少しずらした縫製。縫い目の硬い部分が体にあたる、こすれる時の負担を和らげています。

③お手入れがラクな撥水加工のカバー



水などをこぼしてもサッと拭くだけでお手入れがラク。

④すぐれた通気性の中材



脱幕加工のウレタン使用によるすぐれた通気性。丸洗いをしても乾きがスピーディです。

マルチパッド



そのまま敷いても丸めて抱えても折って挟んでも使えるマルチパッド
体側生地:高通気・撥水・防汚・ソフトタッチ
ベッド側生地:高通気立体織

UCGR110

サイズ(mm)

800×550×30

ショルダー


UCGR010

サイズ(mm)

400×500×90



血流を妨げず、呼吸が楽にできる、高さや形状。

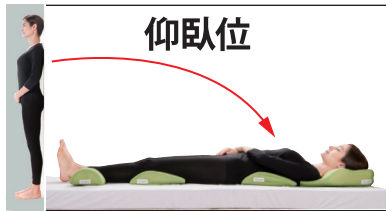

仰臥位

レスト60

UCGR060

サイズ(mm)

500×200×100~180



60°側臥位や背臀位(はいでんい)の際、体の下に布を敷き込む事で安定した姿勢を保ちます。

フェイス

UCGR020

サイズ(mm)

240×190×80



中央部の穴は、伏臥位の下向きでは目、鼻、口。横向きでは耳を入れて安定した姿勢が保てます。



60°側臥位

レスト30

UCGR070

サイズ(mm)

500×250×5~155




30°側臥位をしっかりと保持します。

チェスト

UCGR030

サイズ(mm)

400×400×10~100

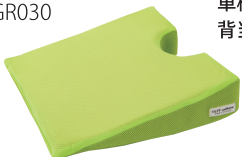

うつ伏せ時の胸部保護。車椅子の背当てや体位変換時の背当てなど様々な用途に対応。




30°側臥位

スパーサー

UCGR080

サイズ(mm)

320×150×60~140

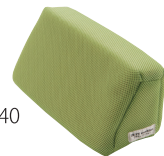

体の隙間を埋める適度な大きさと柔らかさ。

ニー&ウエスト

UCGR040

サイズ(mm)

400×500×60



後頭部・耳・肩甲骨・肘・仙骨・尾てい骨・ひざ内・くるぶし・かかなどの除圧にご使用いただけます。



腹臥位

ロングシート

UCGR090

サイズ(mm)

850×450×40



車椅子や、自動車のシートに最適。背中から座面、座面から足元といった使い方ができます。

アンクル

UCGR050

サイズ(mm)

500×160×80



足首のすきまなどに、自然に優しくフィットします。



ファウラー位

チェアシート

UCGR100

サイズ(mm)

400×400×55



車椅子や、自動車のシートに最適。底づきを軽減する二層構造。

必ずお読みください。【ご使用上の注意】

- カバーから中身を取り出さないでください。
- 中身のウレタンフォームは、紫外線によって少しずつ変色しますが、物性に対する影響はありません。
- 枕やポジショニングクッションの用途以外ではご使用にならないでください。

洗濯について

①カバーをつけたまま「まる洗い」してください。

【洗濯機使用の場合】ソフト洗い(弱水流・手洗い)コースに設定し、
単独(他の物はいれない)で洗濯してください。

【手押し洗いの場合】優しく手押し洗いをしてください。

ウレタンフォームは、水気を含んだ状態で負荷がかかると亀裂を生じ、
破損につながりますので、絶対にもみ洗いはお止めください。

②いずれかの方法で洗った後、脱水機にかけて充分水気を切ってください。

(水気が多いと、乾燥に時間がかかり、臭いやカビの発生の要因となります。)

③洗濯、脱水が終わりましたら、風通しの良いところで十分に陰干しをしてください。

別売の「乾燥ネット(UCNET)」をご使用になれば場所を取らず早く乾かせます。

乾燥ネット使用時の陰干し時間の目安:12時間~40時間。

※冬場の気温が低い時期や雨天では中心部まで乾きにくい事がありますので、再度ご使用になる前に押しつぶして水分が残っていないか確認してください。

※中身のウレタンフォームが濡れた状態の時は、大変もろくなっておりますので、取扱いには充分ご注意ください。

※洗濯洗剤の使用に関しまして、粉末洗剤をお使いになるとウレタンフォームの中に残留物が出来る可能性がありますので、液体洗剤か水のみのご使用をお勧めします。

※カバーは、色落ちの恐れがありますので、他のものと一緒に洗濯しないでください。

殺菌消毒処理について

■エタノール使用可/熱80℃ 10分以下可 (但し火気厳禁です。)

■クレゾール使用不可/次亜塩素酸ソーダ不可/オートクレーブ不可

■推奨①:専用剤(クラスゼロアルティ)2倍希釈品スプレー→乾燥

②:専用剤(クラスゼロアルティ)10倍希釈品1時間浸け置き→洗濯・脱水→乾燥

〈別売オプション〉

・乾燥ネット(UCNET):お手持ちのハンガーが使える大変便利です。

・クラスゼロ アルティ(水成二酸化塩素水)(CZ010):製品を傷めず安全性の高い高性能除菌剤です。

*商品には、万全の管理をしておりますが、万一不都合がございましたら、下記までご連絡ください。

生命を包む世界品質

発売元 **ACTION**
JAPAN

アクション ジャパン 株式会社

〒658-0046 神戸市東灘区御影本町2丁目9-16

アクションジャパンビル

TEL.078-843-5417 FAX.078-843-6817

